


# Une GAMME de 1<sup>ère</sup> intention SIMPLE & COMPLÈTE

pour toutes vos adaptations en LRPG

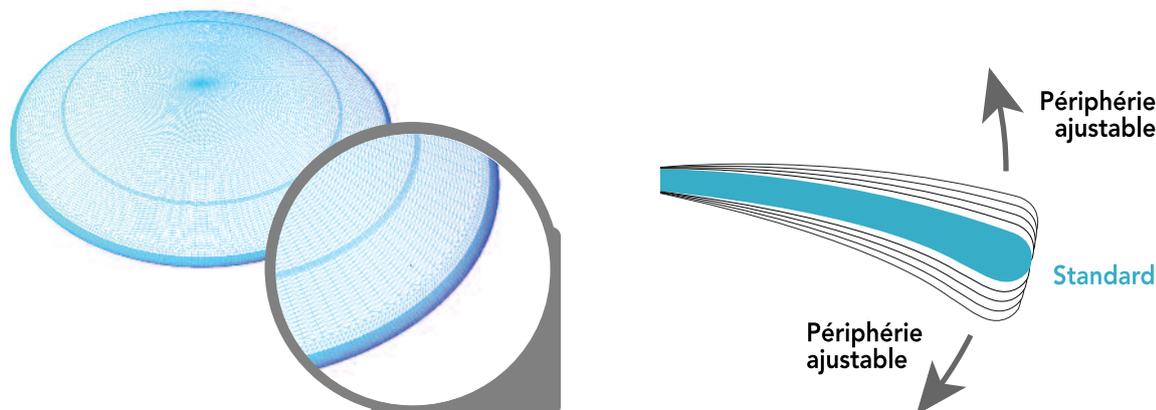

## Port Diurne

	Toricité cornéenne <40/100	Toricité cornéenne ≥ 40/100
	Equipement Sphérique	Equipement Torique
Myope, Hypermétrope Astigmaté	<b>PRE AS XL*</b> <b>PRE Enfant / PRE Jeune</b> Ø 10.20 $r_o = K+0.05$	<b>PRE AS TI*</b> <b>PRE Enfant TI / PRE Jeune TI</b> Calculée par le laboratoire ou Ø 10.20 $r_o = K / r_o' = K'+0.15$
	<b>PRE DS*</b> Ø 9.50 $r_o = K_m + 0.10$	
Presbyte Emmétrope Myope Hypermétrope Astigmaté	<b>Expert Progressive*</b> Ø 9.00 $r_o = K_m$	<b>Expert Progressive TI*</b> Calculée par le laboratoire ou Ø 9.00 $r_o = K-0.05 / r_o' = K'+0.10$

	Débutant	Évolué
Kératocône	<b>PR2*</b> Ø 8.50 $r_o = K_m$	<b>PR2 K</b> Périphérie ajustable selon le stade Ø 8.50 $r_o = K_m$

## Port Nocturne Orthokératologie

Myope Astigmaté	<b>DRLM / DRLM Enfant / DRLM Jeune</b> Calcul logiciel d'après topographies
Hypermétrope	<b>DRLH / DRLH Enfant / DRLH Enfant</b> Calcul logiciel d'après topographies

### \*Périphérie ajustable

PRE AS XL / PRE Enfant / PRE Jeune par pas de 0.10

PRE AS TI / PRE Enfant TI / PRE Jeune TI par pas de 0.10 indépendamment dans chaque méridien

PRE DS, Expert progressive et PR2 par pas de 0.05



# Le CHOIX des MATÉRIAUX et des TEINTES

	Boston XO2	Optimum Extrême	Boston XO	Optimum Extra	Optimum Confort	Boston EO	Boston ES
<b>Préconisation</b>	<b>PRE Enfant</b>		<b>DRL</b> ● ●		<b>Expert Prog. PRE AS XL PR2 / PR2K</b>	<b>PRE AS XL PR2 / PR2K</b>	<b>Expert Prog. PR2 / PR2K</b>
Dk	161*	125	100	100	65	58	18
Dk/e PREAS XL PRE Enfant/ Jeune	115	89	71	71	46	41	13
Teinte de différenciation od/og	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ○	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ○
Fort besoin en O2	+++	+++	+++	+++			
Film lacrymal Mauvaise qualité	+	+	+	+	++	++	+++
Mouillabilité	++	++	++	++	++	++	+++
Orthokératologie			+++	+++			

\*ISO 18369-4 (141 bord corrigé) ● bleu (OG) ● bleu clair ● violet (OD) ● vert ● vert clair ● gris ○ incolore

## ENTRETIEN recommandé

### Pour le port diurne

**Precilens B5 | Procare**



**Pack ENFANT** jusqu'à 16 ans

**Pack JEUNE** jusqu'à 25 ans

**Un pack B5 + une boîte de Procare OFFERTS**

associés à 2 lentilles PRE Enfant ou PRE Jeune

### Pour l'orthokératologie

**Oxyclean | Aquadrop+ | Procare**



**Pack Ortho K 1<sup>er</sup> pas OFFERT**

aux nouveaux porteurs pour leur 1<sup>er</sup> mois d'essai en DRL

1 flacon Oxyclean | 1 boîte de 30 doses AQUADrop+ | 1 ventouse

**Pack Ortho K 3 mois**

pour les porteurs confirmés

2 flacons Oxyclean | 3 boîtes AQUADrop+ | 1 boîte de Procare

### Service aux Professionnels

Tél. 01 45 13 18 49 - Fax 01 45 13 18 46 - E-mail : [technique@precilens.com](mailto:technique@precilens.com)

Retrouvez l'ensemble de nos produits et services sur [www.precilens.com](http://www.precilens.com) et [www.lentilledenuit.com](http://www.lentilledenuit.com)



LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE FRANÇAISE EN LENTILLES DE CONTACT



**Precilens**