

# Lentilles C2 XTRA

remarquables  
à tous points de vue



Prix public indicatif  
**29,50€** par mois  
Lentilles + Solutions



## Lentilles mensuelles en matériau silicone hydrogel

Matériau silicone hydrogel	FILCON II 3 58 % d'hydrophilie Filtre UV
Module d'élasticité de Young	0,5 Mpa
Coefficient de friction	0,23
DK	60
Epaisseur e/c (-3.00 D Low)	0,07 mm
DK/e	86
Diamètre zone optique	9 mm
Diamètre	14,20 mm
Rayon	8,70 mm
Puissances	de - 8.00 à + 6.00 par 0,25 de - 6.00 à + 6.00 / par 0,50 au-delà de - 6.00
Additions	Low $\leq$ 2.25 - Presbytie débutante à modérée, High $\geq$ 2.50 - Presbytie confirmée
Géométrie	Sphéro - Progressive - VP centrale
Adaptation	Km de 7,30 à 8,20 réfraction maxi convexe
Type et durée de port	Port journalier
Renouvellement	Mensuel
Conditionnement	Boite de 6 lentilles ou Pack 6 mois

**OBSERVANCE ACCRUE** avec le service SMS Observance

**Inscription gratuite par Precilens** des porteurs sur la plateforme Observance afin qu'ils reçoivent un sms les invitant à renouveler leurs lentilles avant la date « recommandée ». Pour en savoir plus sur ce service consulter [www.precilens.com](http://www.precilens.com)

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE FRANÇAISE EN LENTILLES




**Precilens**

# RÉSULTATS VISUELS SUPÉRIEURS

## Design optimisé

- VP et VI favorisées sans compromis en VL
- Transitions douces des puissances pour un confort de vue à toutes distances

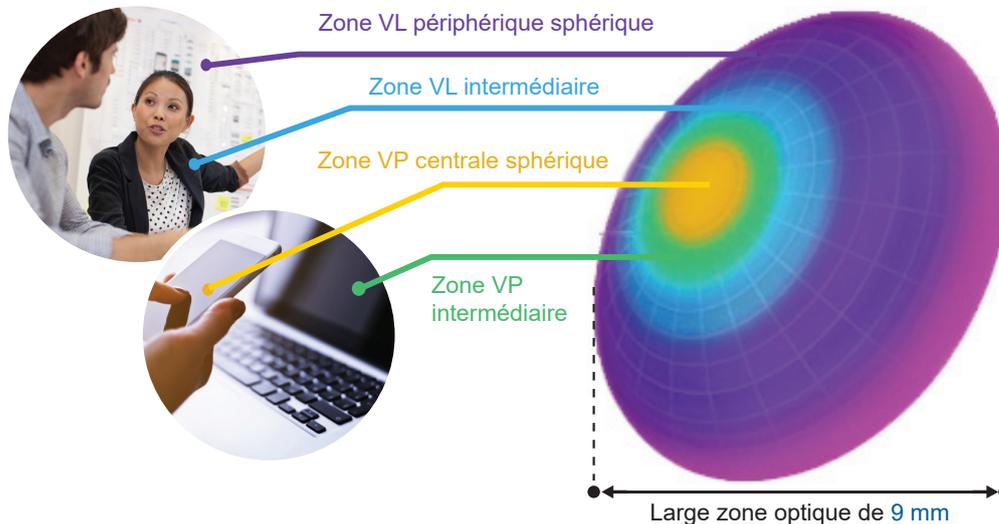

## CONFORT DE PORT et TOLÉRANCE PHYSIOLOGIQUE

- Matériau silicone hydrogel avec faible coefficient de friction (0,23) et faible module d'élasticité (0,5)
- Profil continu des bords

## ADAPTATION SIMPLIFIÉE

- Réfractation VL maximum convexe
- Recherche de l'œil préférentiel :  
En vision binoculaire, le sujet porte sa correction VL :
  - Placer alternativement devant chaque œil un verre de + 0,75 D
  - L'œil le plus gêné de loin sera l'œil préféré de loin
- Choix de l'addition :
  - o Low  $\leq 2.25$
  - o High  $\geq 2.50$
- Contrôle :
  - o Si VP insuffisante :
    - Ajouter + 0,25 sur l'œil préféré VP ou ODG puis contrôler la VL
  - o Si VL insuffisante :
    - Ajouter - 0,25 sur l'œil préféré VL puis contrôler la VP

Commandes lentilles d'essai en ligne sur le site [www.precilens.com](http://www.precilens.com)

Mail : [commande@precilens.com](mailto:commande@precilens.com) | Tél. : 01 45 13 18 45 | Fax : 01 45 13 18 46



LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE FRANÇAISE EN LENTILLES

Precilens